

결 재	작성	검토	검토	승인
	정규완			
	6/15			



Mini
Dual Core
Материал пломбировочный композитный
[Natural / Blue]

Используйте инструкцию



Описание

Материал пломбировочный композитный Dual Core – рентгеноконтрастный композит с двойным (световым и химическим) отверждением. Применяется для восстановления поврежденных зубов и наращивания зуба под коронку.

Характеристики

- рентгеноконтрастность 1.60
- время отверждения – 4.17 мин. (37°C)
- прочность при изгибе: 98МПа
- гигроскопичность: 19мкг/мм³
- растворимость 0.7 мкг/мм³
- масса: 9 гр.

Противопоказания

Dual Core - не применяется у пациентов с гиперчувствительностью и аллергической реакцией.

Состав

- Силикат бария
- Синтетический диоксид кремния
- Аэрозольный порошковый диоксид кремния
- Уретандиметакрилат
- Триэтиленгликольдиметакрилат
- другие вспомогательные вещества

Рекомендуемая процедура

- 1) **Изолируйте участок лечения от влаги.**
- 2) **Удалите все следы кариеса и остатки.**
Защитите обнаженную пульпу или нижнюю часть полости, расположенную рядом с пульпой, с применением минимального количества гидроксида кальция.
- 3) **Протравливание и нанесение адгезива.**
Нанесите на зуб травитель, праймер или адгезив в соответствии с рекомендациями изготовителя. При использовании связующего агента (5, 6, 7 поколения) рекомендуется дополнительно применять активатор (Cross-link).
- 4) **Нанесение композитного материала.**
Выберите картридж или шприц подходящего цвета и поочередно присоедините насадку для смешивания и насадку-апликатор. Нанесите материал на участок лечения. Рабочее время составляет около 1 минуты 30 секунд.
- При работе с картриджем используйте дозатор.
- Прежде чем устанавливать насадку для смешивания, дозируйте небольшое количество материала, чтобы обеспечить его равномерную подачу с обеих сторон картриджа или шприца. Выполните отверждение в течение 40 секунд с использованием источника света с длиной волны 420–500 нм.

Держите наконечник световой головки вертикально на расстоянии не более 1 мм от материала Dual Core и затем проверьте окклюзию. Если световое отверждение не применяется, химическое отверждение происходит в течение 4 минут непосредственно в ротовой полости. При более низких температурах (в передней части) время отверждения может возрасть.

- 5) **Проверьте твердость поверхности с помощью зонда и перейдите к следующему шагу.**

Хранение

- Хранить при температуре от +2 до +24°C в сухом месте.
- Закрывайте колпачок картриджа после использования и храните его при комнатной температуре. Если материал не используется в течение длительного времени, храните его в холодильнике.
- Перед применением необходимо, чтобы препарат был комнатной температуры.
- Не хранить материал с эвгенолсодержащими препаратами.

Номер партии и срок годности

Каждая партия материала имеет свою серию и сроки годности. Срок годности 2 года.

Меры предосторожности

- Применять только в стоматологической практике.
- Изделие предназначено для использования только стоматологами и специалистами по лечению и протезированию зубов.
- Не применять для лечения пациентов с известной гиперчувствительностью или аллергическими реакциями.
- В случае попадания материала на кожу немедленно удалите его с помощью спирта.
- При попадании в глаза промыть большим количеством воды и при необходимости обратиться в специализированное медицинское учреждение.
- Используйте защитные перчатки и маску.
- В случае неотверждения, проверьте интенсивность светового потока у полимеризационной лампы и свяжитесь с дилером или производителем.
- Не использовать совместно с материалами, содержащими эвгенол.
- Запрещается применение изделий с истекшим сроком годности.

Символы



Утилизация

СанПиН 2.1.7.2790-10, Отходы класса Б (эпидемиологические опасные отходы)

Гарантия

Компания Vericom Co., Ltd. заменяет продукты с доказанными дефектами. Компания Vericom Co., Ltd. не принимает на себя ответственность за любой ущерб или убытки, прямые или косвенные, вытекающие из использования или невозможности использования описанного продукта. Перед использованием пользователь несет ответственность за определение пригодности продукта для его независимого использования. Пользователь принимает на себя все риски и ответственность в связи с этим.

Организация, уполномоченная производителем на принятие претензий от потребителей: ООО "ЭТС-ПРО"
Юридический адрес: 105523, г. Москва, Щелковское шоссе, дом 100, корп. 1, офис 5051
Фактический адрес: 105523, г. Москва, Щелковское шоссе, дом 100, корп. 1, офис 5051



VERICOM CO., LTD.

48, Toegyegongdan 1-gil, Chuncheon-Si, Gangwon-Do, Korea
Tel +82-31-441-2881 Fax +82-31-441-2883
E-mail vericom@vericom.co.kr oversea@vericomdental.com
Homepage www.vericom.co.kr