

# Vonflex S™ Bite

Винилполисилоксановый материал для регистрации прикуса

## Описание

Vonflex S™ Bite представляет собой силиконовый материал, полимеризующийся реакцией полиприсоединения, воспроизводит окклюзию пациента на плоскости прикуса путём регистрации соотношения между верхними и нижними зубами.

## Состав

- Винилсилоксан
- Коллоидный диоксид кремния
- Диоксид кремния
- Гидрогенсилоксан
- Органо-платиновый катализатор
- Пигмент

## Техническая информация

	Быстрое отверждение	Нормальное отверждение
Рабочее время, сек (23°C)	30	45
Минимальное время удалить изо рта, сек	30	45
Твёрдость (по Шору А)	88±2	88±2

## Противопоказания

Vonflex S™ Bite не следует использовать у пациентов с гиперчувствительностью или аллергией на силикон, или имеют в анамнезе сыпь или дерматит как реакцию на силикон.

## Показания

- Стандартная регистрация прикуса в финальном положении
- Положение антагонистов
- Покрытие прикусных вилок лицевых дуг
- Ключевой материал для регистрации штифтов
- Изготовление небольших сегментов моделей

## Предостережения

1. Если материал проконтактировал с глазами, промойте большим количеством воды в течение нескольких минут. Если симптомы не исчезнут, то проконсультируйтесь со специалистом.
2. Не вдыхайте, не глотайте и не проглатывайте. Если после случайного проглатывания возник дискомфорт, немедленно обратитесь к специалисту. В редких тяжёлых случаях, может возникнуть блокада пищевода.
3. Не оставляйте частицы материала в десневых бороздках или ротовой полости.
4. Vonflex S™ Bite не может быть использован для снятия обычных оттисков, так как его высокая конечная твёрдость затрудняет его извлечение изо рта. Может произойти нежелательное извлечение каких-либо элементов.
5. У гиперчувствительных пациентов могут возникнуть аллергические реакции на материал.

## Рекомендуемая процедура

1. Перед применением Vonflex S™ Bite, полностью удалите остатки любых загрязнений в полости рта, промойте и просушите.
2. Поместите картридж Vonflex S™ Bite в диспенсер.
3. Выдавите небольшое количество оттискового материала перед установкой смешивающего наконечника, чтобы убедиться в проходимости с обеих сторон картриджа.
4. Плотнo прикрепите смешивающий наконечник к картриджу, затем поверните цветной ободок наконечника на 90° по часовой стрелке.
5. Нажмите несколько раз на рукоятку, чтобы выдавить материал на окклюзионную поверхность зубов. Располагайте пациента в центральной окклюзии, чтобы зарегистрировать прикус.
6. После отверждения материала, удалите его изо рта. Если обнаружите избыток материала, то подрежьте.
7. Убедитесь, что прикус зарегистрирован и готов к моделированию.

### **Хранения**

1. Хранить в прохладном месте (2~24°C).
2. Немедленно после использования плотно закройте крышку.
3. Избегайте контакта с воздухом.

### **Меры предосторожности**

1. Vonflex S™ Bite должен использоваться только стоматологом. Держите его вне досягаемости посторонних, в том числе детей, престарелых и т.д.
2. Не используйте повреждённые изделия.
3. Смешивающие наконечники только для одноразового использования. После использования, оставляйте наконечник на картридже, чтобы держать его закрытым.
4. В случае, если произошёл контакт или смешивание Vonflex S™ Bite с силиконами добавочной полимеризации, полисульфидными материалами, эвгенол-содержащими материалами, латексными перчатками, влагой, глицерином, косметикой, только что внесёнными композитными пломбирочными материалами, и пр., либо контакт с таким же материалом Vonflex S™ Bite, это может отсрочить полимеризацию, либо привести к шероховатости на поверхности Vonflex S™ Bite.
5. При использовании местных анестетиков в виде спрея, велика вероятность замедления схватывания или повреждения поверхности.
6. Следует избегать попадания незатвердевшего материала на одежду. При затвердении на ткани плохо очищается.
7. Не используйте Vonflex S™ Bite после окончания срока действия.
8. В случае охлаждения, материал должен приобрести комнатную температуру перед использованием. Температура хранения перед использованием может удлинить или укоротить рабочее время. Повышение или понижение температуры на 1°C ускоряет или замедляет схватывание на 15 секунд.
9. Vonflex S™ Bite должен использоваться в соответствии с инструкцией по применению.

### **Гарантия**

VERICOM CO., LTD. заменит материал в случае подтверждения его дефективности. VERICOM CO., LTD. не несёт ответственность за любое повреждение или убыток, прямые или косвенные, в результате использования или невозможности использования описанного продукта. Перед использованием пользователь несёт ответственность за определение пригодности продукта для его предполагаемого использования. Пользователь принимает на себя все риски и ответственность в связи с этим.